

機械器具(25) 医療用鏡
一般医療機器 自然開口向け内視鏡用くもり止め (70176000)
クリアステイ

【形状・構造及び原理等】

〈形状・構造〉

1. 形状

本品は無色透明な溶液である。(内容量 3mL)



2. 組成

エタノール、アクリル共重合物

3. 原理

本品を内視鏡のレンズ面上に塗布することにより、レンズ面上に無色透明な被膜を形成して結露を防止する。

【使用目的又は効果】

自然開口部より挿入される内視鏡のレンズ面上に塗布して使用する。内視鏡と体内温度差により発生する結露を防止する。

【使用方法等】

- ①内視鏡レンズ面を清掃し、汚れを取り除く。
- ②本品を内視鏡レンズ面に1回噴霧する。
- ③レンズ面には触れずそのまま自然乾燥させる。

【使用上の注意】

- ・アレルギー症状を起こした場合は、使用を中止すること。
- ・本品が目に入らないように注意すること。
- ・火気の近くでは使用しないこと。

〈使用方法等〉

- ・塗布面を十分に乾燥させてから使用すること。
- ・本品を塗布したのち、レンズ面をガーゼ等で拭いたりしないこと。
- ・本品を再塗布する場合は、レンズ面の汚れ等を除去してから行うこと。

【保管方法及び有効期間等】

〈貯蔵・保管方法〉

- ・直射日光や火気、高温多湿の場所を避け、常温(25度以下)で保管すること。
- ・結露させないこと。
- ・立てて保管すること。

〈使用期限〉

包装に記載(自己認証による)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

*製造販売業者

株式会社ニューロシューティカルズ
東京都文京区本郷一丁目28番10号 本郷TKビル
TEL: 03-3818-6622

製造業者

株式会社ニューロシューティカルズ