



エンドゼロクリアS

ENDØCLEAR S


内視鏡レンズに無色透明なコーティング膜を形成して
術中のクリアな視野を確保します。

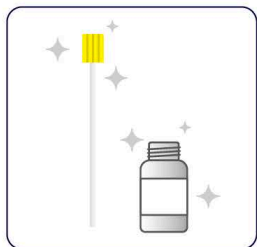

バイアル(瓶)、スポンジを
滅菌袋から取り出してください。

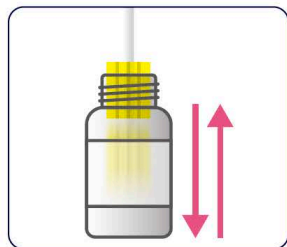

スポンジにコーティング剤を
染み込ませてください。

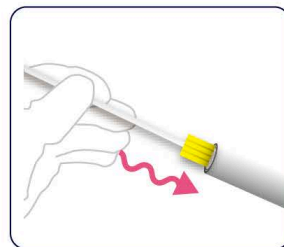

内視鏡レンズ面にスポンジを優し
く押し当てて、コーティング剤を
塗布します。



自然乾燥させて
コーティング完了になります。

簡単
コーティング

約90秒で
自然乾燥

【仕様】

商 品 名 エンドゼロクリアS

製 品 番 号 EZC-2ML

内 容 量 2mL × 5本

機械器具(25)医療用鏡
管理医療機器 人工開口向け内視鏡用くもり止め
認証番号:303AFBZX00079000

Neuroceuticals
Moving at lightning speed in the Medical device market

製造販売業者

株式会社ニューロシューティカルズ

〒113-0033

東京都文京区本郷一丁目28番10号 本郷TKビル

TEL : 03-3818-6622